

000/0060.042/20



## Coohy Fingertip, koelende Hydrogelpleister voor de vinger

**Coohy Fingertip** is een niet-inklevende pleister met waterrijk Hydrogelkompres. Het unieke vingerpleistermodel creëert een constante koeling all around. Ideaal voor gebruik in de voedingssector door de blauwe kleur en metaaldetecteerbare aluminiumstrip.



### Eigenschappen

- Afmetingen: 9.5 x 13.5 cm.
- Blauwe elastische pleister. K
- oelt de verhitte huid, verzacht hierdoor de pijn en neemt overtollig huidvocht op.
- De koeling komt tot stand door:

Ø het temperatuurverschil tussen de gel en de huid. De verhitte huid heeft een temperatuur van +/- 31°C en de kamertemperatuur bedraagt +/- 20°C.

Ø Het water in de gel heeft een verwarmings-capaciteit: er is warmte-energie nodig om de temperatuur te doen stijgen tot de lichaams-temperatuur. Dit proces duurt ongeveer 30 – 45 minuten, met als gevolg dat de gel koud blijft aanvoelen.

Ø Zelfs wanneer de Coohy Fingertip 31°C heeft, kan het water in de gel verdampen. Ook nu is er warmte-energie nodig om te verdampen en deze energie wordt van de huid genomen. Daardoor blijft de Coohy Fingertip koud aanvoelen gedurende enkele uren na het aanbrengen.

- Uniek model van pleister, specifiek ontwikkeld voor de vingers en de vingertoppen.
- Dit pleistermodel garandeert een constante koeling van de volledige vinger: cooling all around.
- Model geregistreerd door MExT.
- Metaaldetecteerbaar.


- Hypoallergeen.
- Pijnloos verwijderbaar.
- Product voor eenmalig gebruik.

## Toepassingen

- Ter verzorging van: weinig vochtige schaaf- en snijwonden, eerstegraadsbrandwonden, verhitte, uitgedroogde huid.
- NIET geschikt voor sterk bloedende, diepe of geïnfecteerde wonden.
- NIET geschikt voor tweedegraads- en derdegraadsbrandwonden.

## Gebruik

- Plaats een MExT Vingerling blauw over de pleister om te beschermen tegen vocht en micro-organismen.
- Als het koelend effect verdwenen is, de huid verder behandelen met een verzorgende zalf voor verhitte huid (bv. Flamex) of een nieuwe Coohy Fingertip aanbrengen om de afkoelingsfase te verlengen.

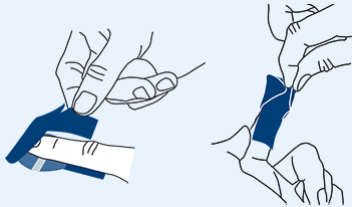

## Inhoud

- 6 stuks.

## Bewaring

- Koel en droog bewaren op kamertemperatuur.
- Vervaldatum: 36 maanden na productiedatum; zie individuele verpakking.

Coohy Fingertip is een medisch hulpmiddel.

**Versie: 24/05/2025**